





MEDICAL DEVICES

DENTASEPT®  
SH PRO

KULLANIM TALİMATI

Tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonu için köpüklü deterjan dezenfektan

### KULLANIM ÖNCESİ

Uygun eldiven giyiniz.

### KULLANIMI

- 1 Dentasept® SH PRO dokumasız bir beze veya doğrudan temizlenip dezenfekte edilecek alana uygulanır.
- 2 Ürünü tüm alana eşit olarak uygulamak için dokumasız bir bez yardımıyla yüzey iyice silinir. (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> veya yaklaşık 10 spreyleme)
- 3 Gerekli aktivite seviyesine ulaşmak için belirlenen temas süresine uyulmalıdır.

Tıbbi cihaz cilt veya mukoza ile temas etmedikçe durulama gerekli değildir.

### UYARILAR

Tehlikeli -kullanım önlemlerine uyunuz.

Tıbbi Cihaz Sınıf IIb, CE 0459.

Kullanmadan önce etiket üzerindeki bilgileri okuyunuz.  
+5°C ile +35°C aralığında saklayınız.

Üretici firma: D.M.D.

Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES

Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com

İthalatçı firma: ANIOS DEZENFEKTAN TİC. VE SAN. A.Ş.

Melek Aras Bulvarı Aromatik cd. no:59/3 - 34956 TUZLA - İSTANBUL

Tel:+90 (216) 347 55 52 Faks:+90 (216) 326 38 69 www.anios.com.tr

