



DENTASEPT®

3H Rapid

KULLANIM ALANLARI

Dentasept® 3H Rapid aletlerin sterilizasyon öncesi ön hazırlığında kullanılmak üzere üretilmiş konsantre deterjan-dezenfektan solüsyondur.

AVANTAJLARI

- ✓ Oldukça ekonomik sulandırma %2 - 1 litreden 50 litre solüsyon
- ✓ Sadece 5 dakikada etkinlik - tüm zarflı virüslere karşı aktif ¹
- ✓ Ultrasonik temizleyiciler ile kullanılabilir
- ✓ pH 7 (%2 dilüsyonda), korozif değildir ve her çeşit materyal ile uyumludur
- ✓ Seyreltiildiği zaman çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır
- ✓ Tıbbi Cihaz Sınıf IIb (Modifiye edilmiş 93/42/EEC Direktifi)

¹ RKI: Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için "sınırlı virüsoidal etkinlik"(begrenzt viruzid wirksam) aktivitesi olan dezenfektanların kullanılmasını önerir. RKI'ye göre sınırlı virüsoidal etkinlik vacciniavirüs ve BVDV'ye karşılık gelmektedir.

20°C'DE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Bakterisit: EN 1040, EN 13727, EN 14561 - 5 dakika

MRSA: EN 13727 - 5 dakika

Yeastisit: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 5 dakika

Tüberkülosidal: EN 14348, EN 14562 - 60 dakika

HIV-1, PRV(HBV model virüs), BVDV(HCV model virüs),

Vaccinia virüs, Herpes virüs'e karşı etkinlik - 5 dakika

KİMYASAL İÇERİK

Didesildimetilamonyum klorid, klorheksidin diglukonat, non-iyonik sürfektan, esans, renklendirici ve ekspiyenler.

AMBALAJ

1 litre şişe dozaj bölümlü

5 litre bidon doz pompalı



INSTRUMENTS

DENTASEPT® 3H Rapid

KULLANIM TALİMATI


Dentasept® 3H Rapid aletlerin sterilizasyon öncesi ön hazırlığında kullanılmak üzere üretilmiş konsantre deterjan-dezenfektan solüsyondur.

KULLANIM ÖNCESİ

Uygun eldiven giyiniz.

KULLANIMI

- 1 Dentasept® 3H Rapid %2 sulandırılarak kullanılır. (1 litre suya 20ml) 1 litre şişe:Doz ayarlayıcısını gerekli seviyeye doldurun
5 litre bidon:1 pompa basımı= 20ml
- 2 Aletleri solüsyon içine tamamen daldırın, ağız kapalı bir şekilde gerekli aktivite süresine bağlı olarak önerilen süre boyunca solüsyon içinde bekletiniz.
- 3 Aletleri solüsyondan çıkarırken gözle görülebilir herhangi bir kalıntı olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa fırçalayın.
- 4 Akan suyun altında veya suya daldırarak durulayın
- 5 Aletleri kurulaşın ve sterilizasyon için hazırlayın.
- 6 Solüsyonu günde en az bir defa yenileyin.

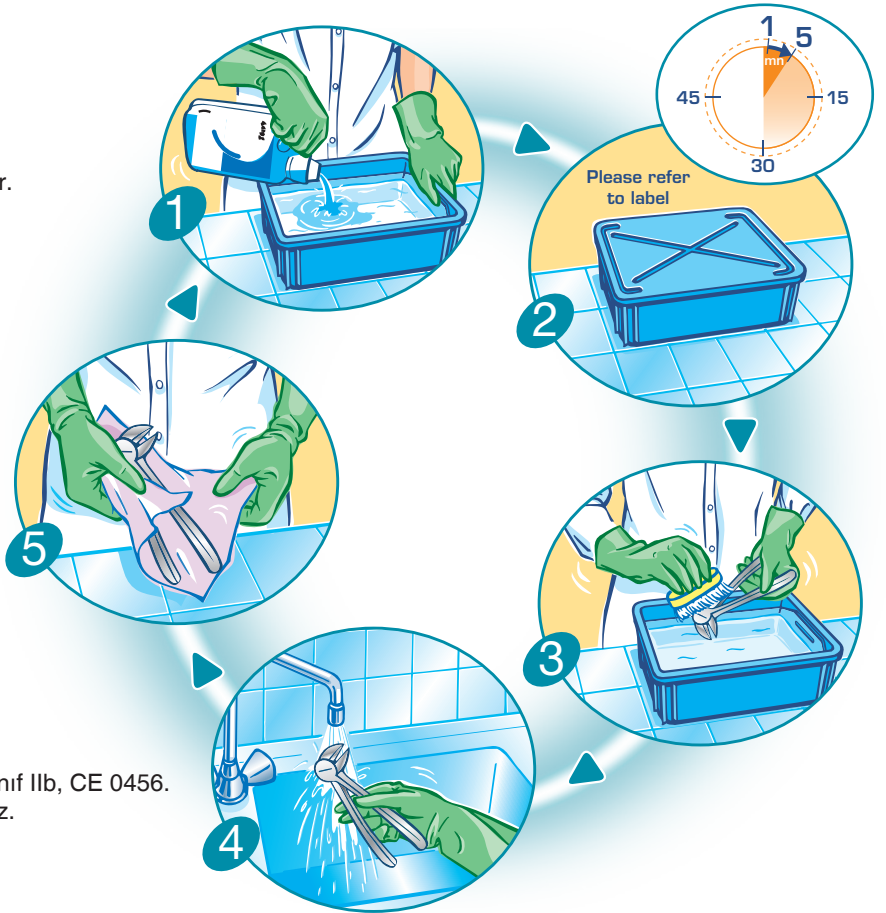

UYARILAR

Tehlikeli-kullanım önlemlerine uyunuz.Tıbbi Cihaz Sınıf IIb, CE 0456.
Kullanmadan önce etiket üzerindeki bilgileri okuyunuz.
+5°C ile +35°C aralığında saklayınız.

Üretici firma: D.M.D.

Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES

Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com

İthalatçı firma: ANIOS DEZENFEKTAN TİC. VE SAN. A.Ş.

Melek Aras Bulvarı Aromatik cd. no:59/3 - 34956 TUZLA - İSTANBUL

Tel:+90 (216) 347 55 52 Faks:+90 (216) 326 38 69 www.anios.com.tr