



DENTASEPT®

Special Rotative

KULLANIM ALANLARI

Frezler, döner başlıklı aletler ve kanal malzemelerinin sterilizasyon öncesi temizliği ve dezenfeksiyonu için deterjan-dezenfektan solüsyon.

AVANTAJLARI

- ✓ Kullanıma hazır solüsyon
- ✓ Geniş bir materyal uyumluluğuna sahiptir, nikel, titanyum, tungsten karbür, vb.
- ✓ Temas süresi: 15 dakika
- ✓ Mükemmel mikrobiyolojik özellik - tüm zarflı virüslere karşı etkin ¹
- ✓ Ultrasonik yıkayıcılar ile kullanılabilir.
- ✓ Tıbbi Cihaz Sınıf IIb (Modifiye edilmiş 93/42/EEC Direktifi)

¹ RKI: Robert Koch Enstitüsü enfeksiyon zincirini kırmak için "sınırlı virüsidal etkinlik" (begrenzt viruzid wirksam) aktivitesi olan dezenfektanların kullanılmasını önerir. RKI'ye göre sınırlı virüsidal etkinlik vacciniavirüs ve BVDV'ye karşılık gelmektedir.

20 °C 'DE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

Bakterisit: EN 1040, EN 13727+A1, EN 14561 - 5 dakika.
Yeastisidal: EN 1275, EN 13624, EN 14562 - 15 dakika.
Tüberkülozit: EN 14248, EN 14563 - 60 dakika
PRV (HBV model virüs), Herpes virüs, BVDV(HCV model virüs) ve Vaccinia virüs'e karşı etkin - 5 dakika

KALİTATİF KOMPOZİSYON

N,N-didesil-N,N-dimetilamonyum karbonat, non-iyonik sürfektan, kompleks yapıcı ajan, esans, renklendirici ajan, eksipiyenler.

AMBALAJ

2 litre şişe
5 litre bidon



DENTASEPT® Special Rotative

KULLANIM TALİMATI

Frezler, döner başlıklı aletler ve kanal malzemelerinin sterilizasyon öncesi temizliği ve dezenfeksiyonu için deterjan-dezenfektan solüsyon.

KULLANIM ÖNCESİ

Uygun eldiven giyiniz.

KULLANIMI

- 1 Dentasept ®Special Rotative'i daldırma banyosuna boşaltın. Sulandırmayın
- 2 Aletleri tamamen solüsyonun içine daldırın,kapağı kapalı bir şekilde beklemeye bırakın.15 dakikalık temas süresine uyunuz.
- 3 Aletleri daldırma banyosundan çıkarın. Akan suyun altında durulayın.
- 4 Aletleri iyice kurulayıp sterilizasyon için hazırlayın.

Solüsyonu günde en az bir defa yenileyin.

UYARILAR

Tehlikeli - kullanım önlemlerine uyunuz. Tıbbi Cihaz Sınıf IIb, CE 0456. Kullanmadan önce etiket üzerindeki bilgileri okuyunuz.

+5°C ile +35°C aralığında saklayınız.

Üretici Firma: D.M.D.

Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES

Tel: +33 3 20 67 67 67 Fax: +33 3 20 67 67 68 www.anios.com

İthalatçı Firma: ANIOS DEZENFEKTAN TİC. VE SAN. A.Ş.

Yüzüncüyıl Mah. Filistin Sokak 31/3 Gaziosmanpaşa- ÇANKAYA/ANKARA

Tel: 0 (312) 436 01 11 Faks: 0 (312) 436 02 74 www.anios.com.tr

