

simple&smart
ITALO

Az olan, bazen daha fazladır



İç yapısı **BASİT**

daha az yardıma ihtiyaç duyar


kolay kurulum

DAHA AZ elektronik parça

DAHA GÜVENİLİR BİR ÜNİT için

İşte bu yüzden biz

simple&smart

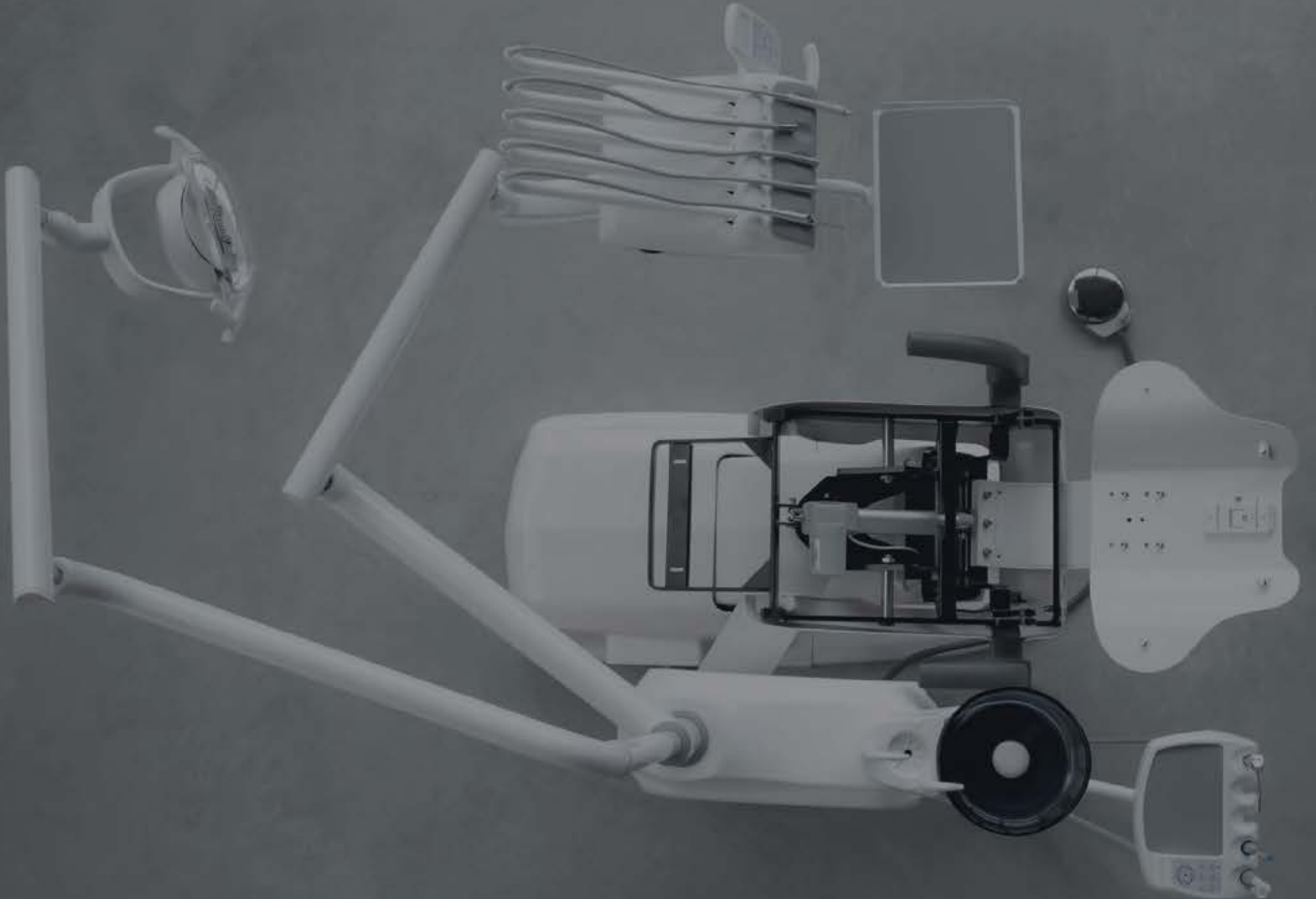

1 TEKNİK ÖZEL LİKLER



TEKNİK ÖZEL LİKLER

KONFORLU & KEYİFLİ

daha iyi ergonomi



Oturma **yeri** ve **sırtlık**, hastanın sandalyede konforunu ve stabilitesini artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Özel ergonomik yapısı, doktorun daha uygun bir pozisyonda çalışmasına olanak tanır. 12 yönlü (saat 12 pozisyonunda) çalışmak artık daha kolay olacaktır.

Metal yapıya sahip **sırtlığın** ekstra ince tasarımı, koltuğun ergonomisini geliştirir


ve doktorun hastaya kolayca yaklaşmasını sağlar. Bu sayede hekim, daha verimli bir çalışma pozisyonuna ulaşır.

Tasarımı sayesinde **ünit tabanı**, oturma yerinin daha geniş bir hareket alanına sahip olmasını sağlar. İnce yapısı, sandalyenin daha alçak pozisyonlara inmesine olanak tanır; bu da çalışma alanını genişletir ve doktorun günlük uygulamalardaki konforunu artırır.

TEKNİK
ÖZEL
LİKLER

İÇTEN GELEN KALİTE

dayanıklılık ve performansı bir arada sunar

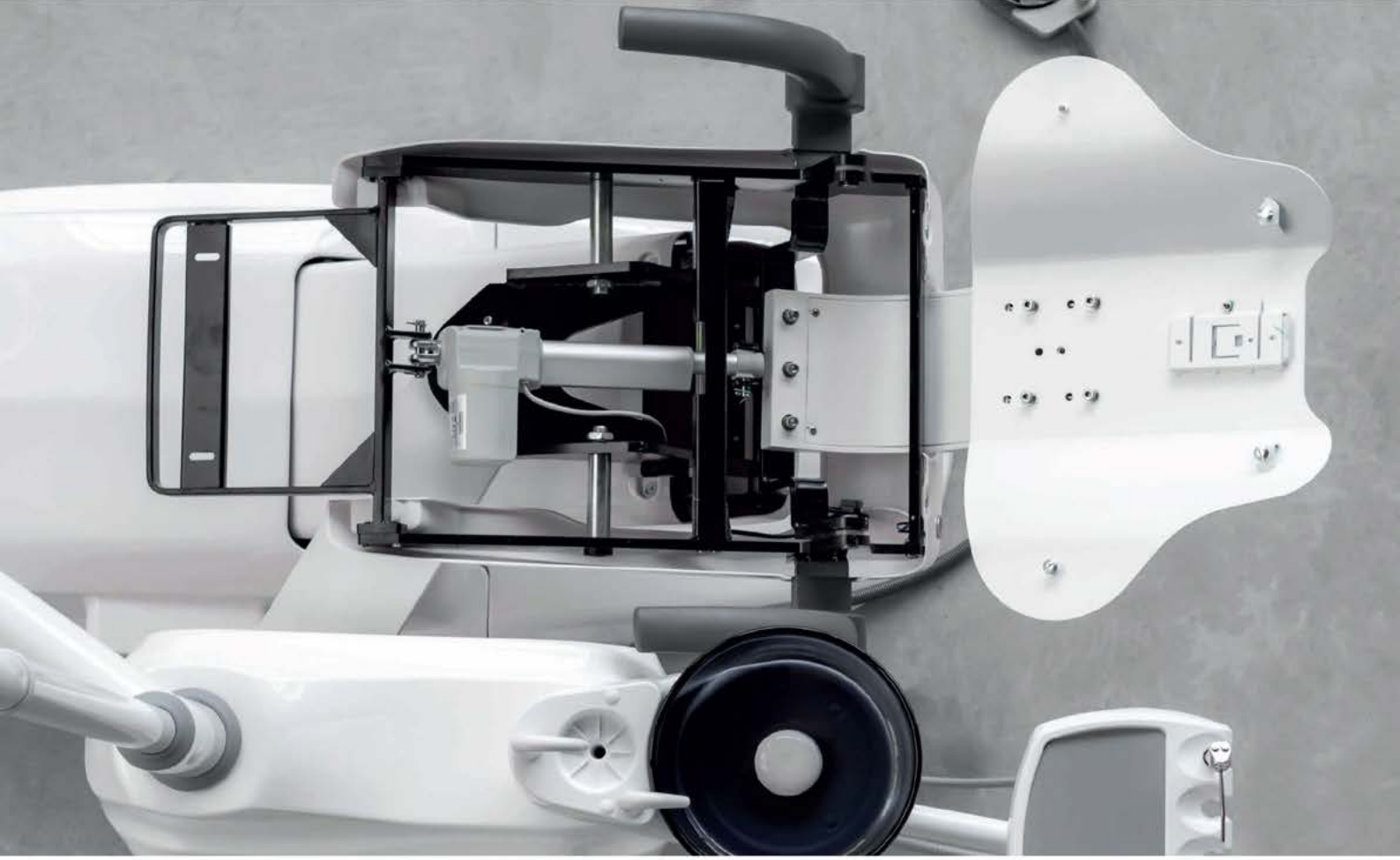

Su ünitesinin iç yapısı ve ünitenin en hassas parçaları tamamen alüminyumdan üretilmiştir. Bu sayede ünitenin ağırlığı azalır, hareket kabiliyeti artar, pas oluşumu önlenir ve yoğun kullanıma maruz kalan parçalarda üstün dayanıklılık sağlanır.

SS_ITALO dental ünitesi, su ünitesi içine entegre edilmiş saf su tankı ve dezenfeksiyon sistemi ile donatılmıştır. Her bir aspirasyon kanülü için ayrı ayrı yerleştirilmiş, hava geçirmez iki filtre sayesinde mükemmel emiş performansı ve yüksek hijyen standartları sağlanır. Yeni nesil motor ise daha güçlü çalışırken, daha az sesle maksimum verimlilik sunar.

TEKNİK ÖZEL LİKLER

FARKILIKLAR

sizi şaşırtacak yeniliğimizle tanışın!

Basitlik, dayanıklılık ve uygun maliyet SS_ITALO'da bulundu. SS_ITALO, **basit** ve **işlevsel** cihazlara ihtiyaç duyan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Temel gereksinimleri karşılayan sade bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, **verimli** ve **uzun ömürlü** bir kullanım sunar.

Maliyetleri minimumda tutmak amacıyla geliştirilen SS_ITALO, yüksek kalite standartlarının yanı sıra avantajlı fiyat ve fonksiyonel çözümler aranan **kamu ihaleleri** ve **büyük projeler** için ideal bir seçenektir.

Peki, SS_ITALO'yu diğer S&S ünitelerinden ayıran nedir?



GÜÇ ANAHTARI İLE KOLAY KONTROL

Diğer S&S dental ünitelerinden farklı olarak, SS_ITALO'nun sandalye tabanında kompresörden gelen havayı aktif hale getiren bir kol bulunmaz. Bunun yerine, yalnızca elektrik beslemesini AÇMA/ KAPAMA işlevi gören pratik bir güç anahtarıyla donatılmıştır.

TEPSİ KOLLARINDA SADELEŞMİŞ YAPI

Hem doktor tepsisi hem de asistan tepsisi kolları, ünitenin yapısını sadeleştirmek amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Daha yumuşak hatlara sahip bu yeni tasarım, hareketlerde sadelik ve akıcılık sağlar. Ayrıca, lamba direği doktor tepsisi kolu üzerine entegre edilmiştir.



TEKNİK ÖZEL LİKLER

FARKILIKLAR

sizi şaşırtacak yeniliğimizle tanışın!

SABİT SU ÜNİTESİ

Sabit Yapı, Değişmeyen Konfor Su ünitesi döner yapıda değil, sabit olarak tasarlanmıştır. Bu tercih, ünitenin yapısını sadeleştirerek daha sağlam ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Bu sabit yapı, asistanın günlük uygulamalar sırasında doktoru desteklemesi için gereken çalışma alanını hiçbir şekilde kısıtlamaz; konfordan ödün verilmez.



SANDALYE TABANI VALFİ

Ünit Tabanında Basit ve Etkili Filtrasyon Ünit tabanına entegre edilen filtrasyon sistemi, diğer iki modele kıyasla daha sade bir yapıya sahiptir. Bu tasarım, bakım kolaylığı ve kullanım pratikliği sağlar.

HEKİM TABURESİ

S_ITALO, standart konfigürasyonunda MOD.02 model hekim taburesi ile birlikte sunulmaktadır. Bu modelde, oturma yüksekliğini yukarı-aşağı ayarlamaya ve sırtlığın eğimini değiştirmeye olanak tanıyan iki adet kontrol kolu bulunur. Taburenin standart döşemesi PU deri olup, talep edilmesi durumunda FIBER LEATHER (elyaf deri) kaplama seçeneğiyle de temin edilebilir.



KONFİ GÜRAS YON



KONFİ GÜRAS YON

HER ALANA UYGUN

tasarım

htiyacınıza Uygun Esnek Seçenekler. Kullanım alışkanlıklarınıza göre en uygun **ens-trüman tepsisi** tipini seçebilirsiniz. Aynı şekilde **tükürük haznesi** seçimi de tamamen size bırakılmıştır. Temizliği kolaylaştırmak amacıyla, koyu renk camdan üretilen tükürük haznesi çıkarılabilir yapıdadır.

ASKILI TABLET



KAMÇILI TABLET



SERAMİK KREŞUAR



CAM KREŞUAR

Ne seçerseniz seçin, ekstra bir maliyet olmayacaktır.

KONFİ
GÜRAS
YON

STANDART

SOL & SAĞ KULLANIM

HAREKETLİ KOL YAPISI

KONFİ GÜRAS YON

STANDART



STANDART DONANIM

- Ergonomik koltuk
- Doktor tepsisinde 5 kablolu modül:
 - 3 fonksiyonlu 1 enjektör
 - 5 ucu ile birlikte EMS uyumlu 1 WP scaler
 - Midwest tipte, 2'si optik fiberli, 1'i optik fibersiz olmak üzere 3 el aleti hortumu
- Asistan tepsisi:
 - 3 fonksiyonlu 1 enjektör
 - Güçlü ve zayıf emiş için çift kanüllü sistem
- Doktor tepsisinde 15 fonksiyonlu kontrol paneli
- Asistan tepsisinde 10 fonksiyonlu kontrol paneli
- 3 adet programlanabilir pozisyon + reset pozisyonu + son pozisyon hafızası
- Röntgen film görüntüleyici
- Su/hava kontrolü için ayak pedalı
- Döner yapıda beyaz seramik veya koyu cam tükürük haznesi seçeneği
- Tepsiler için silikon, otoklavlanabilir pedler
- Saf su sistemi ve dezenfeksiyon sistemi için entegre tank
- Sensörlü, 30.000 lux LED eco lamba
- 1 adet sol kol dayanağı
- Yüksek kaliteli, yırtılmaya karşı dayanıklı
- PU deri döşemeli minderler
- 2 ayarlanabilir pozisyona sahip PU deri doktor taburesi

KONFİ GÜRAS YON


SOL & SAĞ



- Su ünitesi ve enstrüman tepsisi, dental ünitenin etrafında dönebilir yapıdadır
- Su ünitesi ve enstrüman tepsisinin konumu, istenildiği zaman birkaç dakika içinde kolayca değiştirilebilir
- Solak doktorlar için de uygundur
- Tüm parçalar, doktor tarafından doğrudan döndürülebilir; teknisyen müdahalesine gerek yoktur
- Askı Tipi (Hanging Type) veya Üstten Montajlı (Top Mounted) seçenekleri mevcuttur
- Diğer tüm özellikler, Standart konfigürasyon ile aynıdır



KONTROL SİZDE
ÜNİTİNİZİ
KOLAYCA
DÖNDÜRÜN
YALNIZCA BİRKAÇ DAKİKADA

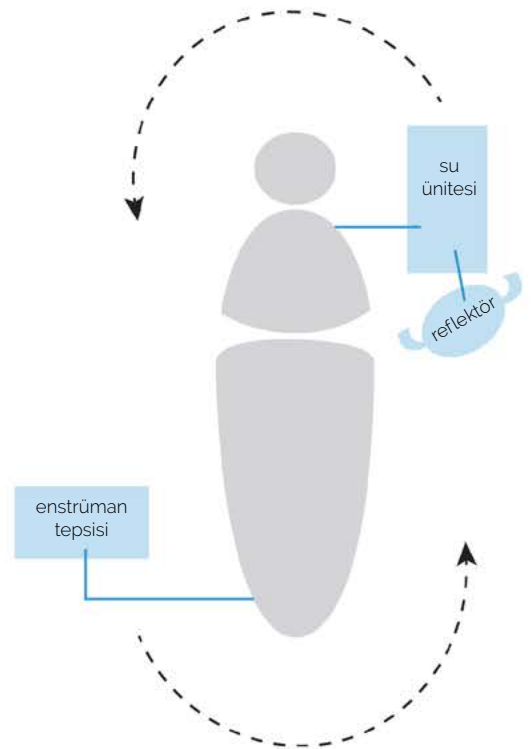

KONFİ GÜRAS YON


HAREKETLİ KOL YAPISI



- Daha da sadeleştirilmiş tasarım
- 3 ayrı ve kişiselleştirilebilir modül ile maksimum esneklik:
 - Asistan tepsisi
 - Doktor tepsisi
 - Operasyon lambası
- Su ünitesi olmadan, tam esneklik
- Su ünitesi bulunmaz; tasarım daha sade ve pratiktir
- Tüm modüller (doktor tepsisi, asistan tepsisi ve lamba) dental ünitenin etrafında bağımsız olarak dönebilir
- Tüm parçalar, doktor tarafından doğrudan ayarlanabilir; teknisyen müdahalesine gerek yoktur



HER AÇIDAN
ÖZGÜRLÜK
HER AN SENİNLE

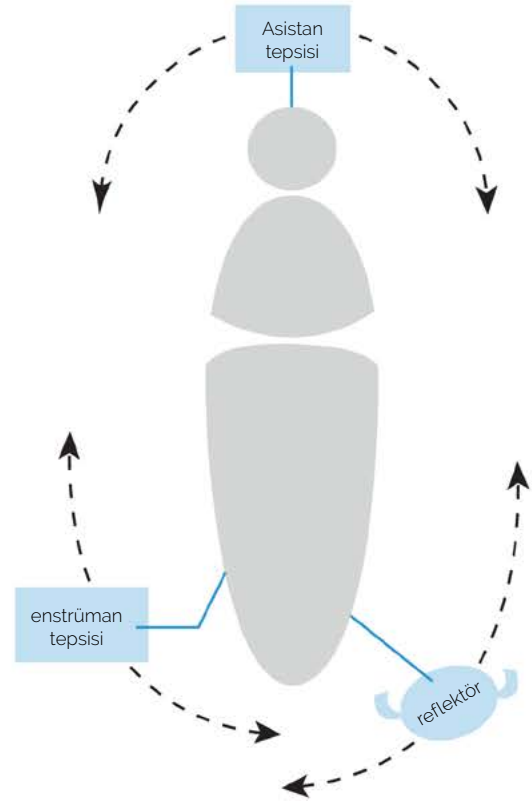

KONFİ
GÜRAS
YON

ORTODONTİSTLER İÇİN

ideal tasarım



- 2 ayrı ve kişiselleştirilebilir modül:
 - Doktor tepsisi

ENSTRÜMAN TEPSİSİ

- Asistan tepsisi, mikromotorlar ve el aletlerinin yerleştirilmesine uygun şekilde tasarlanmıştır.

- Ortodontistler için ideal tasarım
- 2 modül, dental ünitenin etrafında birbirinden bağımsız olarak dönebilir
- Tüm parçalar, doktor tarafından doğrudan ayarlanabilir; teknisyen müdahalesine gerek yoktur

KİŞİSEL LEŞTİR

senin
ünitin



KİŞİSEL
LEŞTİR

SİZİN TERCİHİNİZ

sizin üniteniz



Size özel, sizin için tasarlandı. Dental ünitelerimiz, ihtiyaçlarınıza göre **birçok opsiyonel özellik**le donatılabilir.

Ünitenin iç yapısındaki sade tasarım korunurken, taleplerinize göre özelleştirmeler yaparak size **en uygun çözüm**ü sunuyoruz.

Deneyimleriniz ve geri bildirimleriniz, ürünlerimizi sürekli geliştirmemize yardımcı oluyor.

Her durum için en iyi çözümü sunuyoruz

Standart üretim sürecinin dışında kalan talepleriniz için özel olarak oluşturulmuş bir ekibimiz bulunmaktadır. Bu sayede ünitenin ergonomik ve işlevsel özelliklerini ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak mümkündür.

Bir dileğiniz varsa, onu gerçeğe dönüştürmek için buradayız!

OPSİYONEL

aksesuarlar

kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar valf
sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis



KONFOR VE ŞIKLIK BİR ARADA

Dikişli tasarımıyla daha fazla konfor! Standart PU deri minderler, kolay temizlenebilirlik açısından dikişsiz olarak üretilmektedir. Ancak Fiber Leather döşeme, hastalarınıza daha yüksek bir konfor hissi sunar. Standart bir renk skalası mevcut olmakla birlikte, 200'ün üzerinde renk seçeneği arasından dilediğinizi seçerek ünitenizi kişiselleştirebilirsiniz.

İKİNCİ TABURE SEÇENEĞİ

Asistanınız için ekstra tabure. Asistan kullanımı için ideal olan ekstra tabure, klinik ihtiyaçlarınıza pratik bir çözüm sunar. Farklı renk seçenekleri ile tarzınıza ve taleplerinize uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir.



SAĞ KOL DAYANAĞI

Sağ kol dayanağı, birçok doktorun tercih etmemesi nedeniyle standart konfigürasyona dahil edilmemiştir. Ancak hasta konforunu artırmak isterseniz, kişiselleştirilmiş ünitenize opsiyonel olarak ekleyebilirsiniz.

OPSI YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar valf
sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis

LED REFLEKTÖR ECO

Sensörlü Aydınlatma Sistemli ECO LED PEBBLE Işığın yoğunluğunu ayarlamak için sensörle donatılmıştır. Bu lamba, 30.000 lux'a kadar ışık yoğunluğu sağlayabilir. Temizlemesi kolay ve hoş bir tasarıma sahip olan bu lamba, mükemmel fiyat-performans oranının mükemmel bir örneğidir.

LED REFLEKTÖR EVA

Yüksek Kaliteli LED Lamba Işık gücü 3.000 ile 50.000 lux arasında ayarlanabilir. Diş hekimliği pratiği için ideal renk sıcaklığını seçebilirsiniz: 5700K, 5000K, 4000K ve 2700K. Patentli, benzersiz yansımali ışık optik tasarımı, net bir ışık noktası sağlar ve hastalar için göz kamaşmasını engeller. 360°'den fazla dönebilen 3D başlık hareketi, ağzın her köşesini aydınlatma imkanı sunar.

Made by **FARO** - Italy

LED REFLEKTÖR MAIA

Yüksek Kaliteli LED Lamba - MAIA. Işık gücü 8.000 ile 35.000 lux arasında ayarlanabilir. Maia, profesyonel bir LED lamba arayan diş hekimleri için ideal bir tercihtir; güvenilir, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli aydınlatma performansı sunarken, rekabetçi fiyatıyla öne çıkar. MAIA dental lambasının ışık noktası net tanımlanmış olup, göz kamaşması riskini ortadan kaldırarak hasta ve tıbbi ekip üyelerinin gözlerini korur.

Made by **FARO** - Italy



OPSi YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar valf
sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis

KAMERA KİTİ

- **24V Monitör**, Renkli, 15" Ekran, Cam Koruma
- **Intraoral USB Kamera** Full HD çözünürlük, otomatik odaklama, fare ile kontrol, LED aydınlatma
– simple&smart
- Monitör Montajı İçin **Kol Seti**

MONİTÖR ve **KAMERA**, özel bir direk seti ile dental ünitenize montelenmiştir. Kamera, USB bağlantı kablosu sayesinde PC'ye veya cihazla birlikte sağlanan istasyona görüntü kaydetme imkanı sunar. Bu Full HD kamera (1920 x 1080), otomatik odaklama, fare kontrolü, ve 3 farklı yoğunluk seviyesine sahip LED aydınlatma ile donatılmıştır. Kameranın başlığı 280° dönebilir, bu özellik işinizi kolaylaştırır ve hastalar için daha az rahatsızlık yaratır. Kamera KİTİ, hastalarınıza çalışmalarınızı gerçek zamanlı olarak gösterebilmeniz için mükemmel bir çözümdür.



SUPERMEDIA KİTİ

- **Panel PC**: Ünitenize montelenmiş, dokunmatik ekran, kablosuz fare ve klavye ile birlikte.
- **USB Kamera**: Panel PC'ye bağlanmış, CARESTREAM - Fransa üretimi.
- Monitör Montajı İçin **Kol Seti**



Panel PC ve kamera ayrı ayrı olarak da kullanabilir, ancak en iyi çözüm bunları birlikte kullanmaktır. PC, dokunmatik ekranlıdır ve normal bir bilgisayar gibi çalışır. İnternet bağlantısı, RVG sistemi, endoskop kamera ve tüm yönetim programları doğrudan çalışma alanınızdan kontrol edilebilir. Kamera ile kombinasyonu ihtiyaç duyduğunuz tüm görüntüleri almak ve kaydetmek için mükemmel bir çözüm.

OPSI YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis



LUZZANI HAVA SU SPREYİ

Düz veya eğimli
3 veya 6 fonksiyonlu



TKD YÜKSEK HIZLI TURBİN

Işıklı veya ışısız



TKD COUPLING

KAVO / Bien Air compatible



STRAIGHT

1:1
TKD
Işıksız



BLUE

1:1
TKD
Işıklı veya ışısız



RED

1:5
TKD
Işıklı veya ışısız



BLUE

1:5
W&H
Işıklı veya ışısız



RED

1:5
W&H
Işıklı veya ışısız

OPSI YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis



WOODPECKER SCALER

Işıklı
EMS uyumlu
Satelec uyumlu (isteğe bağlı)



TKD SCALER TITANUS

Işıklı veya ışısız
EMS Uyumlu
Satelec uyumlu



WOODPECKER IŞINLI DOLGU CİHAZI

Asistan tepsisinde kablolu



TKD KIT MOON IŞINLI DOLGU CİHAZI

6 sertleştirme programı
Yüksek güçlü LED lamba
Düz veya tabanca pozisyonu
@8mm optik fiberli lamba (@5mm optik
fiber de mevcuttur, daha yüksek çıkış gücü için)

OPSI YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis

Enstrüman tepsisi bir veya birden fazla mikromotor ile donatılabilir. Mikromotorlar, her müşterinin ihtiyaçlarına göre pnömatik veya elektrikli olabilir. **Tüm markalara ait kontrangelere, bu iki mikromotorla uyumlu olarak adapte edilebilir.**



TKD MICROMOTOR

Işıksız Pnömatik Mikromotor, 20.000 rpm içten sprej sistemine sahip. Pnömatik mikromotor, herhangi bir kontrol paneline ihtiyaç duymadan doğrudan kabemanuel olarak kontrol edilebilir.

TKD ELEKTRİKLİ MICROMOTOR

Kesin LED Modeli

Işıklı, iç sprejli, fırçasız sistem, 40.000 rpm. Eğer kontrol paneli seçilmezse, mikromotorun hızı sadece pedal aracılığıyla basitçe ayarlanabilir. Ters dönüş kontrolü manuel olarak yapılır. Dijital tork kontrolü bulunmaktadır.



OPSİ YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya kiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis

ELEKTRİKLİ MİKROMOTORLAR İÇİN KONTROL PANELLERİ

Mikromotorunuzu Daha İyi Kontrol Etmek İçin Mikromotorunuzu daha iyi kontrol etmek isterseniz, analog veya dijital olmak üzere iki kontrol panelinden birini seçebilirsiniz. Her iki panel de iki elektrikli mikromotoru aynı anda kontrol edebilir

TKD LCD DİJİTAL DUOPAD

Dijital Panel

Dijital panel, mikromotorun hızını, torkunu, dönüş yönünü ve ışığını kontrol etmenize olanak tanır. Kontroller dijital olup, özel dokunmatik ekran paneli üzerinden yapılır. Bu çözümle daha fazla bellek kullanımı mümkün değildir.



TKD ANALOG DUOPAD BUTONLU

Analog Panel

Analog panel, dijital panellerle aynı kontrol imkanlarını sunar, ancak analog duopad aynı zamanda daha fazla bellek kullanımına olanak tanır. Analog sistemin avantajı, butonlarla yapılan basit seçimlerdir.



OPSi YO NEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya æekiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis

Tüm Dental Ünitelerimizde DÜRR Valfleri Kullanılmaktadır. Her müşterinin özel taleplerine ve klinikte mevcut olan emiş sisteminin türüne göre, tüm dental ünitelerimizde DÜRR valfleri montelenir. Dental ünitelerimiz, varsayılan olarak sıvı veya ıslak emiş makinelerine bağlanacak şekilde önceden ayarlanmıştır. Ayrıca, ünitenin şu özelliklerle entegre edilmesi mümkündür:



1. CAS1 VALFİ

Bu valf, 2, 3 ve 4 numaralı valfleri birbirine bağlamaya olanak tanır. Ayrıca entegre bir amalgam ayırıcıya sahiptir. Bu çözüm, yalnızca SS_ONE ve SS_KISS model dental üniteleri için mevcuttur.



2. CS1 HAVA/SU AYIRICI VALF

Bu valf, ünitenin kuru emiş motoruna bağlanabilmesi için gerekli düzenlemeyi sağlar.

3. KESİCİ VALF

Birden fazla ünite (tek bir emiş motoruna bağlanan iki ünite veya daha fazla) kurulumunda kullanılır.

4. TÜKÜRÜK HAZNESİ VALFİ

Basın çukurunun drenajını, sandalyenin tabanında yalnızca bir tüp bulunduğunda, aspiratöre yönlendirmek için kullanılır.



5. VENTURİ SİSTEMİ

Emiş makinesinin olmadığı durumlarda kurulmak için kullanılır.

Üniteyi sipariş etmeden önce klinik durumunun iyi analiz edilmesi çok önemlidir. S&s ekibi, ünitenizi sisteminize en uygun şekilde entegre edebilmeniz için size Yardımcı olacak ve en iyi çözümü önerilecektir.

OPSIYONEL

aksesuarlar
kreşuarlar
medya ækiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
ünite arabası
bakım ve servis



ENSTRÜMAN TEPSİSİ YERİNE ENSTRÜMAN ARABASI

Enstrüman tepsisine alternatif olarak, dental ünitenizi enstrüman arabasıyla donatabilirsiniz. Arabada, enstrüman tepsisiyle aynı ekipman bulunmaktadır:

- **Doktor Tepsisinde Beş Kablolü Modül:**
 - 3 Fonksiyonlu 1 Enjektör
 - 5 Ucu ile EMS uyumlu 1 WP scaler
 - Midwest tipi 3 kablo (2'si optik fiberli, 1'i optik fibersiz)
- **15 Fonksiyonlu Kontrol Paneli**
- **Röntgen Film Görüntüleyici**

bakım ve servis

Amacımız, **siz**e en hızlı şekilde yardımcı olmaktır. Bu yüzden, tüm yedek parçalarımız teslimat için hazırdır ve talebin alınmasından itibaren 12 saat içinde gönderilebilir.

Sorunlarınızı daha hızlı çözmek için yedek parça kitleri. Olası sorunlarınızı daha hızlı çözebilmek için **2 adet YEDEK PARÇA KİTİ** oluşturduk. Bu kitleri depolama alanınızda veya kliniğinizde bulundurursanız, herhangi bir sorunu kısa süre içinde çözebilirsiniz.

BASIC YEDEK PARÇA KİTİ



- Ünitenin Tüm Elektrik Panoları
(1 ana kart, 1 trafolu kart, 1 su ünitesi PCB'si, 1 asistan tepsisi PCB'si, 1 enstrüman tepsisi PCB'si)
- 2 Altıgen Membran
- 1 Dikdörtgen Membran
- 2 Emiş Filtresi
- 1 Basın Filtresi
- 1 Regülasyon Valfi
- 2 Kablo Yayları

COMPLETE YEDEK PARÇA KİTİ



- Ünitenin tüm elektrik panoları (1 ana kart, 1 trafolu kart, 1 su ünitesi PCB'si, 1 asistan tepsisi PCB'si, 1 enstrüman tepsisi PCB'si)
- 4 Altıgen ve 2 dikdörtgen membran
- 2 Emiş filtresi
- 1 Basın filtresi
- 1 Regülasyon valfi
- 2 Kablo yayları
- 1 Zayıf ve 1 güçlü emiş sapı
- 2 Enjektör ucu
- 1 Optik fiber kablo
- 1 Asistan + 1 enstrüman tepsisi etiketi
- 1 Dezenfeksiyon sistemi için şişe
- Silikon pedler seti
- 1 Basın musluğu ve 1 cam musluğu

OPSI YO NEL

aydınlatma
sistemleri medya kiti
el aletleri
mikromotorlar
valf sistemleri
enstrümanlar
ünite arabası
bakım ve servis

TEMİZLEME KİTİ




Konseptimiz her zaman ayındır:
Müşteriye en iyi hizmeti sunmak, müşterilerimize ünitelerimizin düzenli bakımı için gerekli tüm ürünleri sağlamaktır. Dental ünitelerimiz için

Temizlik kiti: Temizlik kitimiz, dental ünitelerimizi, filtreleri, silikon parçaları vb. temizlemek ve dezenfekte etmek için en uygun ürünleri içerir. Ayrıca, gerektiğinde bu parçalar değiştirilebilir.

Temizlik Kiti İçeriği:

- 2 Emiş Filtresi
- 1 Basın Filtresi
- 1 Zayıf Emiş Sıpması
- 1 Güçlü Emiş Sıpması
- 1 Silikon Pedal Seti
- 1 Cattani Marka Puly Jet: Emiş tüplerini temizler, bakterileri öldürür, kliniğinizde kötü kokuları engeller ve tüp tıkanmalarını önler.
- 1 Aqua Plus: Ünite içindeki dezenfeksiyon sistemi aracılığıyla tüm iç sistemi temizler. Tüpler içinde mikrofilm oluşumunu engeller ve böylece enstrümanların küçük deliklerine zarar gelmesini önler.
- 1 Esenfix Microzid: Dental ünite yüzeylerini temiz tutar, deri ve hassas plastik parçalarda olabilecek zararları engeller. Alkol içermeyen bir üründür.

4 RENKLER

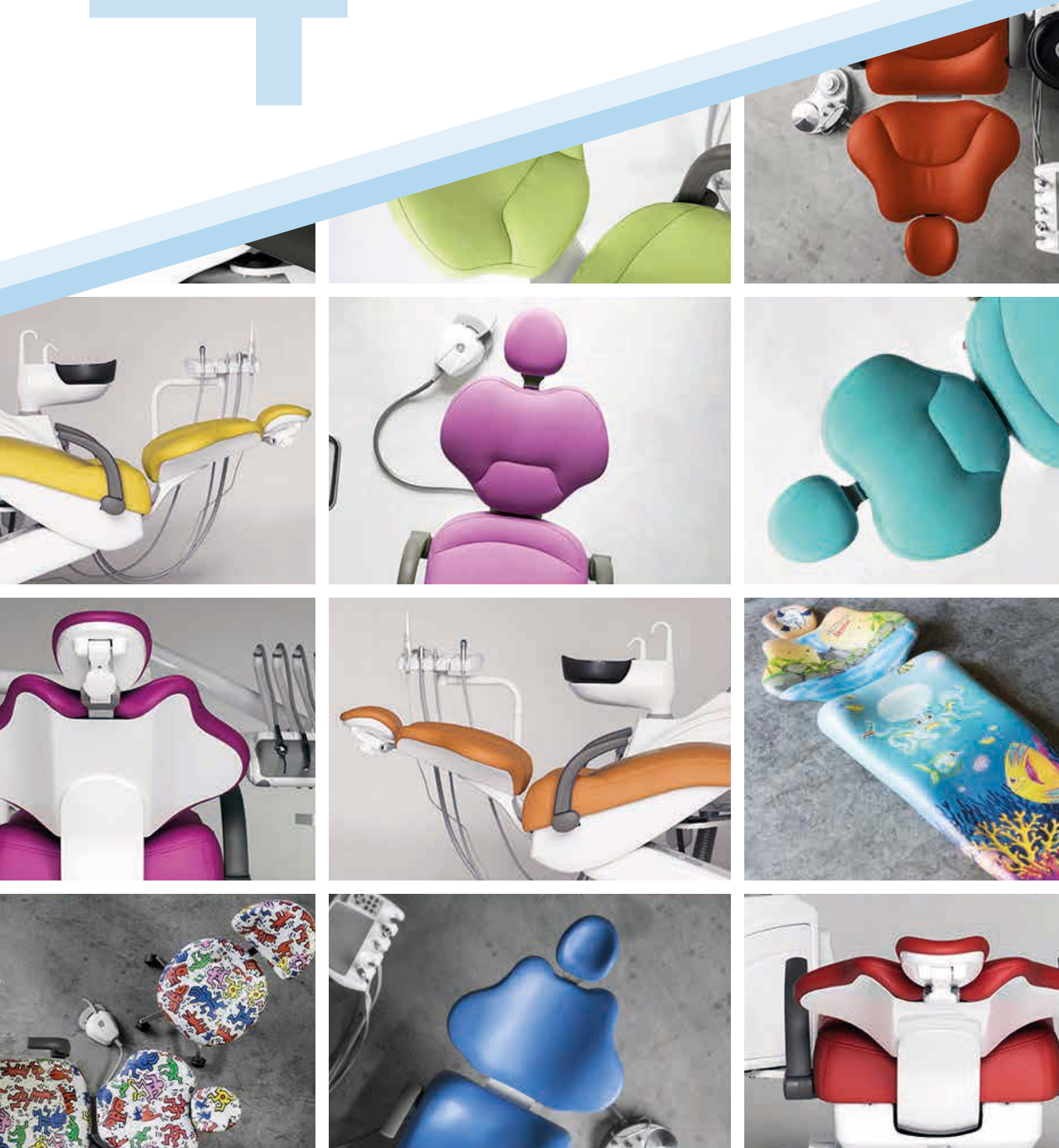

RENKLER

DERİDEN GELEN FARK

sizi şaşırtacak yeniliğimizle tanışın!

Deri Seçenekleri ve Kişiselleştirme

Standart PU, standart Fiber Leather ve 200'ün üzerinde kişiselleştirilmiş renk seçeneğiyle S&S, **şimdiye kadar gördüğünüz en geniş döşeme seçeneğini sunuyor!**

Standart PU poliüretan döşeme, ek bir ücret olmadan temin edilebilir. Standart PU deri, daha kolay temizlik için dikişsiz olarak üretilmiştir. Küçük bir ek ücret karşılığında, hastalarınıza daha yüksek konfor sağlamak için dikişli şık **Fiber Leather** döşemeyi seçebilirsiniz.

PU DERİ DÖŞEME



FİBER DERİ DÖŞEME



RENKLER

LİMİTSİZ

seenek

ÖZEL DERİ RENKLER



Sadece bir renk hayal edin, kişiselleştirilmiş renk seçeneklerimizde kesinlikle bulabilirsiniz! Biraz daha yüksek bir ek ücretle, **200'ün üzerinde renk** seçeneğinden dilediğinizi seçme imkanı sunuyoruz. Bu döşeme türü, **dikişli fiber leather**'dir. Hayal gücünüze sınır koymayın, kliniğinizi benzersiz kılabilirsiniz!

Favori renginizi bulamamak imkansız!

5 ŞİRKET PROFİLİ



ŞİRKET PROFİLİ

HİZMETİNİZDEYİZ



ÜRETİM

Üretim süreci, şirketimizin kalbidir ve bu nedenle her aşamayı büyük bir özenle takip ederiz. Malzeme, boya ve bileşenlerin seçimiyle başlayıp, montaj ve son kontrol aşamalarına kadar her aşama dikkatle izlenir. Her bir ünite, montaj aşamasında ve sevkiyat öncesinde, uzman teknisyenlerimiz tarafından dikkatli bir şekilde çift kontrol işlemine tabi tutulur. ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarımız, bu süreçlerin gerçekten uygulandığını ve saygı gösterildiğini kanıtlamaktadır.

STOK

Teslimatlarımızda son derece hızlı olmak istiyoruz, bu nedenle her zaman stoklarımızda birkaç ünite bulunduruyoruz. Bu ünitelerin büyük bir kısmı zaten montajlanmış ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmaya hazır durumdadır. Gerekli tüm parçalar ve seçenekler stoklarımızda mevcuttur ve ünitenin montajını tamamlayıp teslimatını birkaç gün içinde organize edebiliriz.



SEVKİYAT

Sevkiyat, her müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. Genellikle üniteyi tek bir ahşap kutuda sevk ediyoruz, ancak talep edilirse, kliniğe teslimatı kolaylaştırmak amacıyla ünitenin iki ayrı kutuda sevk edilmesini de sağlayabiliriz. İki ayrı ahşap kutu, daha küçük boyutlarda ve daha hafiftir, bu sayede kamyonndan indirilmesi, kaldırıcı kullanmadan bile kolaylaşır. Ayrıca, azalmış boyutlar, kurulumu beklerken ünitenin kolayca depolanmasını sağlar.

GARANTİ UZATIMI

Dental ünitelerimizdeki standart garanti süresi 1 yıl ile sınırlıdır, ancak isterseniz garantiyi 5 yıla kadar uzatabilirsiniz.

VİDEOLARIMIZI İZLEYİN

Web sitemizde ve YouTube sayfamızda, ünitemizin konfigürasyonu, mevcut seçenekler, kurulum, bakım, dezenfeksiyon vb. hakkında birçok video bulabilirsiniz. Bu videolar, sandalyenizi en iyi şekilde kurmak ve bakımını yapmak için rehberlik sağlar.

www.simplesmart.it

Bu web sitesini, bayilerimize ve müşterilerimize en iyi şekilde destek sağlamak için oluşturduk. Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında tamamen bilgi edinebilir, hatta kişiselleştirilmiş ünitenizi konfigüre edebilirsiniz. Konfigüratörümüzü kullanarak, herhangi bir satın alma zorunluluğu olmadan kişiselleştirilmiş bir teklif alabilirsiniz.

Simple&Smart ile her zaman ihtiyaçlarınıza en uygun ve en basit çözümü bulabilirsiniz.


Sosyal medya sayfalarımızı takip ederek daha fazla bilgi edinebilir ve yeniliklerimiz, ürünlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında güncel kalabilirsiniz.

CANLI YARDIM

Bayimiz iseniz, [WhatsApp](#) numarasını talep edebilirsiniz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Yapmanız gereken tek şey, WhatsApp üzerinden canlı yardım departmanımıza ulaşmaktır. Teknik ekibimiz, teknisyenlerinizi birkaç dakika içinde sorunuzu çözmek için destekleyecektir.

DOSYALAR ÜZERİNE RAPORLAR

Tamamlanmış PDF raporları, e-posta ile gönderilebilir. Sorununuzla ilgili detaylı çözüm bilgileri, belirttiğiniz soruna göre özel olarak açıklanır.daha fazla bilgi edinebilir ve yeniliklerimiz, ürünlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında güncel kalabilirsiniz.

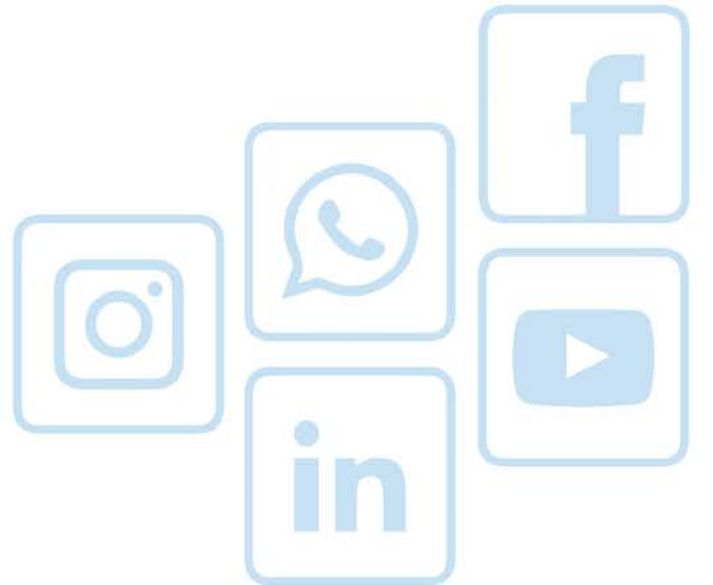

ŞİRKET PROFİLİ

SERTİFİKALAR


ISO ve CE SERTİFİKALARI

Dental ünitelerimiz, Sınıf IIa tıbbi cihazlar olarak sınıflandırılmaktadır. **EC Sertifikası** ve **ISO 13485 Sertifikası**, ürünlerimizin ve prosedürlerimizin geçerli düzenlemelere ve sıkı ISO standartlarına uygun olduğunu garanti eder. **Dental ünitelerimiz CE1370 sertifikasına sahiptir.** Bu sertifikalar, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini garanti eder.

SERTİFİKALI TEKNİSYENLER



Mükemmel kurulum ve satış sonrası destek için **sertifikalı teknisyenler** simple&smart, tüm distribütörlerin teknisyenlerini belirli bir eğitimden sonra sertifikalandırır. Eğitim sonunda teknisyene bir yeterlilik sertifikası verilir. Tüm bunlar, **müşterilere güvenli ve güvenilir bir ürün sunmak ve profesyonel, hassas bir teknik destek sağlamak amacıyla** yapılmaktadır.

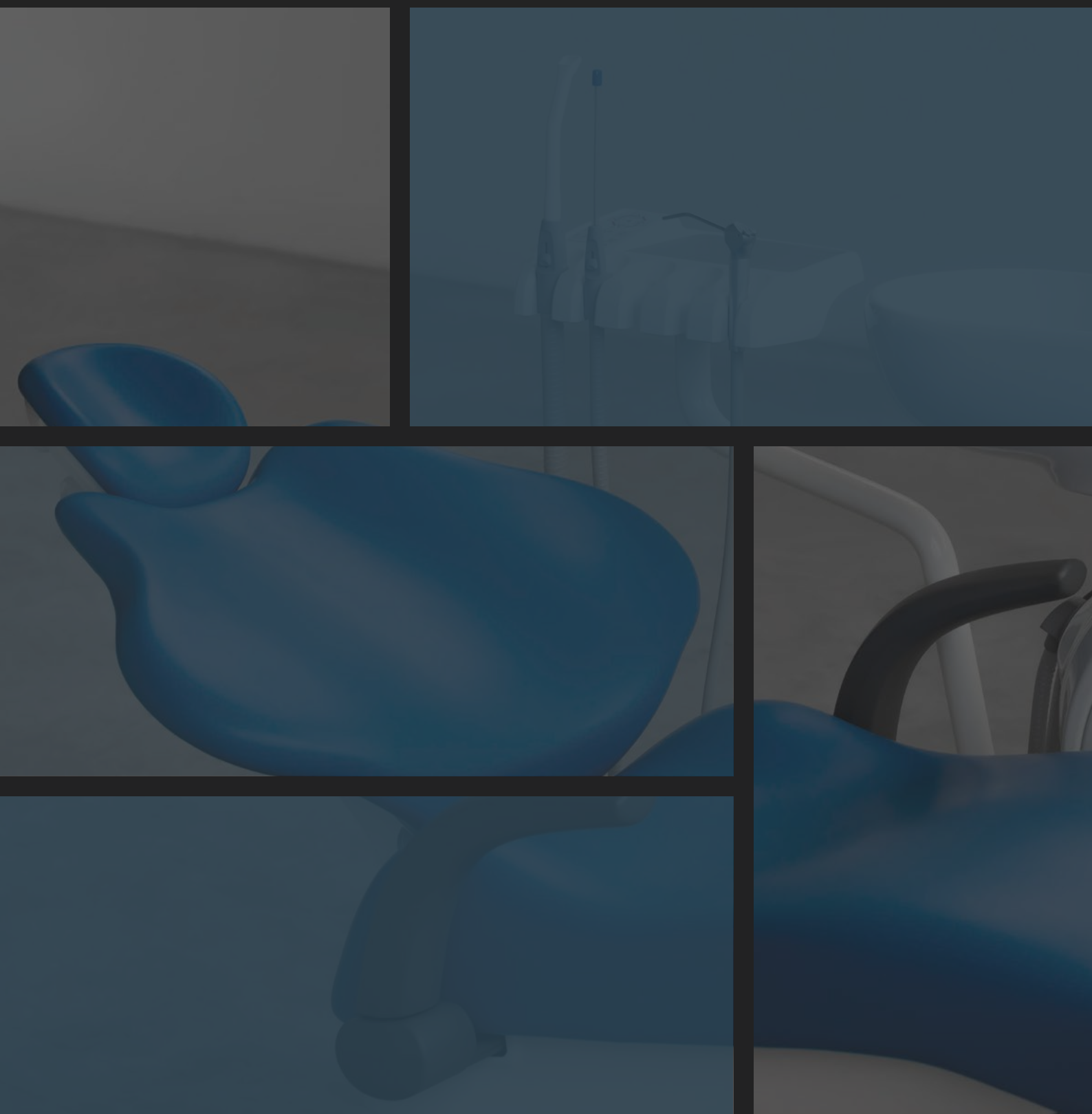

Registered office: Via Perola 16, 24021 Albino, Bg - Italy

Headquarters: Via San Carlo 33/35, 24029 Vertova, Bg - Italy

Ph: +39 (0)35 5295636 | info@simplesmart.it | www.simplesmart.it



simple&smart ITALO



dmsdental.com.tr



+90 532 506 66 66



facebook.com/dms1980



bilgi@dmsdental.com.tr



[nstagram.com/dmsdental](https://instagram.com/dmsdental)



linkedin.com/company/dms-dental

dms
Dental Medikal Sanayi

www.dmsdental.com.tr

Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. Tekstil Kent Sitesi B06 Blok No:10 AI / 105 Esenler, İSTANBUL
Tel: +90. 212. 210 13 34 | GSM: +90. 532. 506 66 66 | e-mail: bilgi@dmsdental.com.tr

www.simplesmart.it